


LookinBody:n automaattisen käynnistymisen poisto


Tarkoituksena on poistaa LookinBody-ohjelmiston automaattinen käynnistyminen tietokoneen käynnistyessä. Tämä nopeuttaa käynnistymistä silloin, kun LookinBody-ohjelmistoa ei tarvita joka käyttökerralla. Ohje on Windows Vista-käyttöjärjestelmälle, katso Windows XP:n ohje lopusta.




1. Valitse aloitusvalikosta oikealta Control Panel

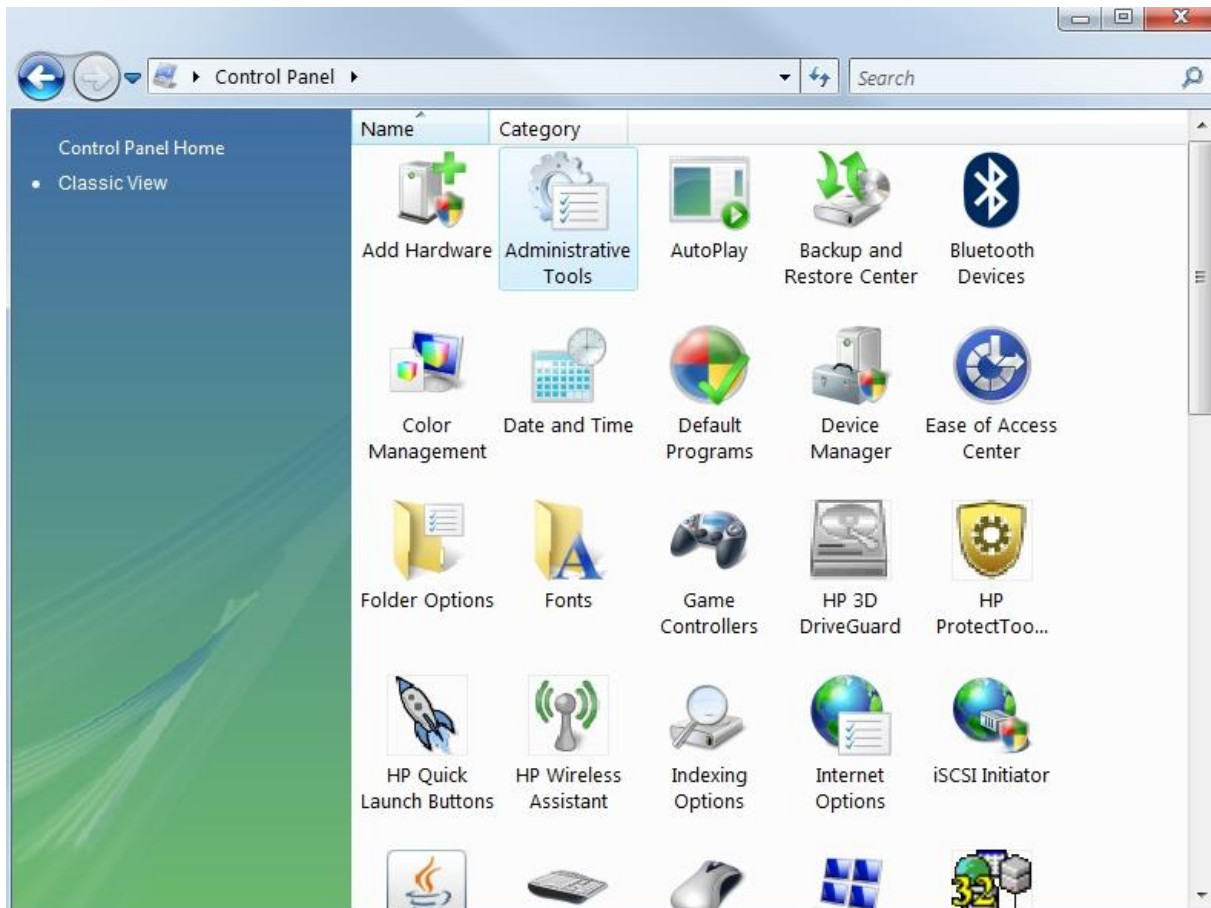

2. Varmista, että Control Panelin näkymänä on Classic view. Näkymä valitaan vasemmasta yläkulmasta. Kaksoisnapauta kuvaketta Administrative Tools.

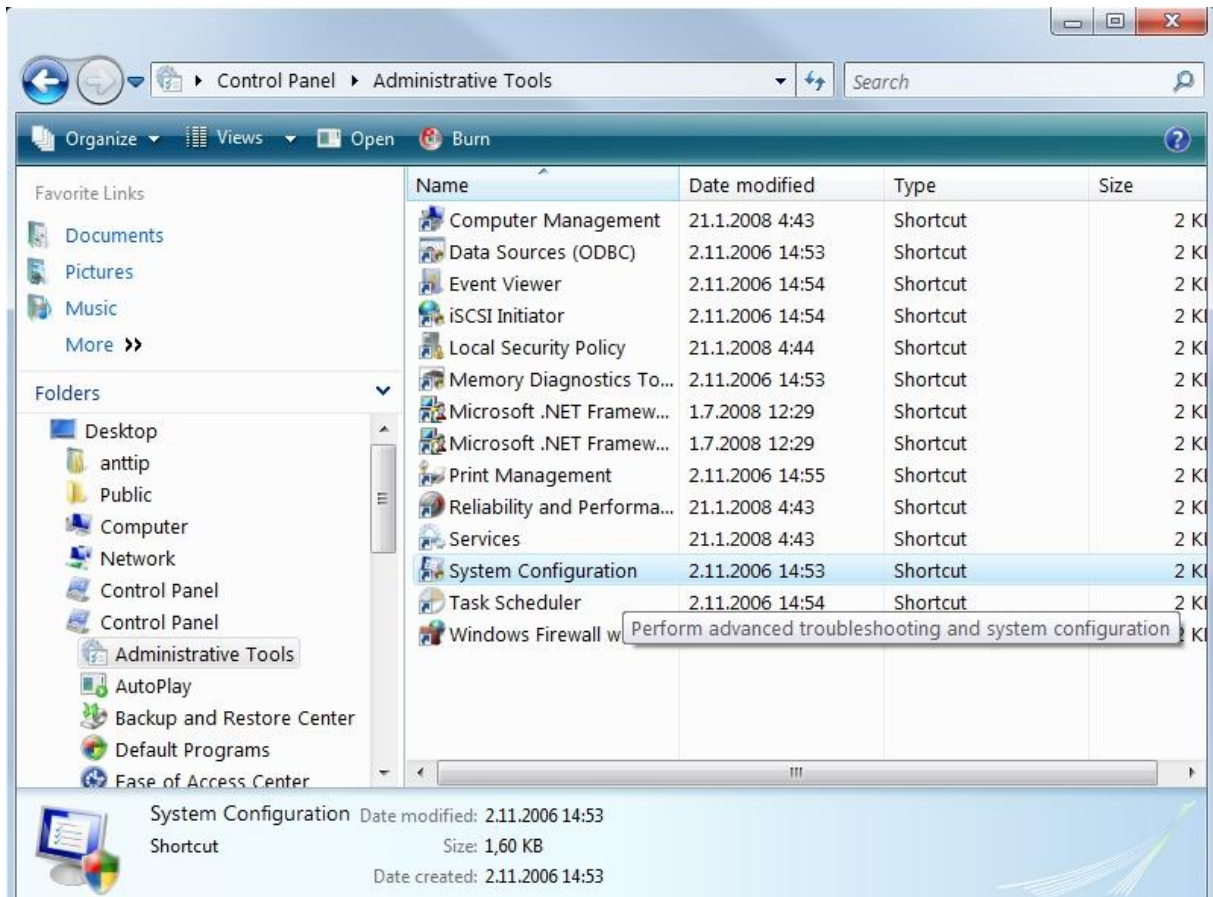

3. Valitse valikon Administrative Tools kohta System Configuration kaksois-napauttamalla sitä.

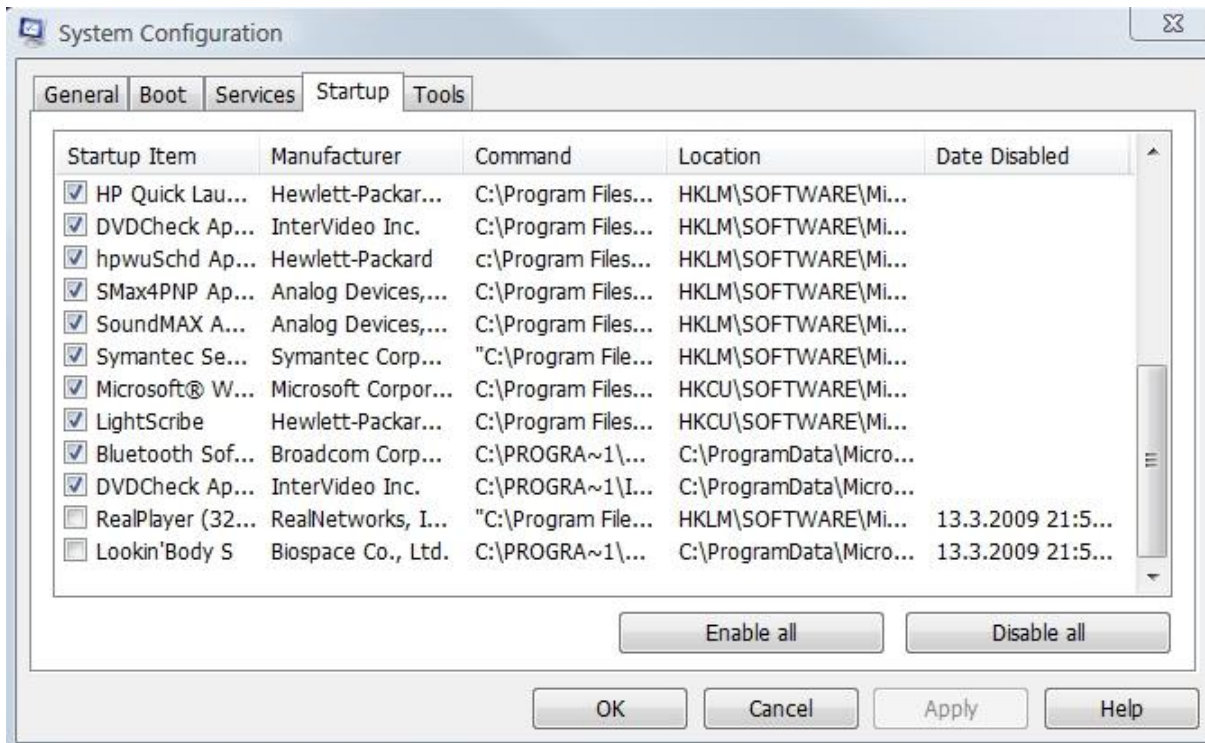

4. Valitse välilehti **Startup** Etsi listasta kohta **Lookin'Body** ja poista rasti sen edestä. Lopuksi paina **OK**

Käynnistysvalikon poisto Windows XP:ssä

1. Valitse käynnistysvalikosta **Run**
2. kirjoita komentoriville msconfig ja paina enter
3. valitse välilehti **Startup**
4. poista rasti kohdasta **ConInBody**
5. paina lopuksi **OK**